

MIP Evakuierungsmatte Typ CS653-0001



- Größe: 185 x 85 cm
- Material: 100% Nylon
- Farbe: rot mit schwarzen Gurten
- Aufbereitung: bis max. 80°C desinfizierend waschbar, alternativ geeignet zur Wisch-Desinfektion, nicht geeignet für Bleichmittel/Chlor oder Weichspüler; bei Bedarf Trocknung im Tumbler bei niedriger Temperatur.
- Max. Patienten-Gewicht: 400kg; sichere Handhabung durch eine Einzel-Person bis 160kg.
- Geeignet für Standard-Matratzen

Kurzanleitung:

1. **Set Up/Installation:** Entfernen Sie die Matratze vom Bett und platzieren Sie die Evakuierungsmatte flach auf dem Lattenrost bzw. der Rostaufgabe. Legen Sie die Matratze direkt auf die Evakuierungsmatte und beziehen die Matratze wieder mit einem (Spann-) Bettlaken und ziehen Sie 4 elastischen Ecken der Evakuierungsmatte über die 4 Ecken der Matratze und verstauen Sie die beiden Trageschlaufen sowie die beiden Sicherungsgurte gut erreichbar unter/neben der Matratze.
2. **Anwendung:** Im Falle einer Evakuierung sichern Sie den Patienten/Bewohner mit den beiden regelbaren Sicherungsgurten „fest“ auf der Matratze liegend. Wir empfehlen eine zusätzliche Polsterung des Oberkörpers mit dem Kopfkissen unter dem oberen Sicherungsgurt.
3. **Evakuierung:** Wir empfehlen die Evakuierung eines Patienten/Bewohners soweit möglich mit mindestens 2 Rettungs-Personen. Holen Sie dazu jetzt die beiden Ziehgurte unter den kurzen Seiten der Matratze hervor. Die 1. Rettungs-Person zieht nun die Evakuierungsmatte zuerst an der Kopfseite vom Bett, während die 2. Person den Kopf des Patienten/Bewohners stützt. Ziehen Sie dann vorsichtig auch den unteren Teil der Matratze vorsichtig vom Bett. Der Patient/Bewohner kann jetzt von den beiden Rettungspersonen über den Boden und ggf. über eine Treppe „geschleift“ und in Sicherheit gebracht werden.
4. **Unterhalt:** Abgesehen von einer gelegentlichen Sicht-Inspektion auf sichtbaren Beschädigungen erfordert die MIP Evakuierungsmatte keine weiteren Unterhaltmaßnahmen.