

SCHUTZHANDSCHUHE für Damen und Herren



1. Ziehen Sie den Fäustling über die Hand des Patienten.
Der Klettverschluss befindet sich auf dem Handrücken.
2. Führen Sie das Flauschband um das Handgelenk und schließen es ohne starken Zug.
3. Klappen Sie die lange Stulpe über das Klettband.

- Schutz vor Nesteln und Kratzen
- erschwert das Öffnen von (Kleidungs-) Verschlüssen
- gute Akzeptanz beim Patienten
- kein selbständiges Abziehen des Handschuhs möglich
- angenehm zu tragen
- einfache Handhabung
- keine Faltenbildung am Handgelenk
- Innenseite 100% Baumwolle

Materialzusammensetzung:

- 45 % Baumwolle/55 % Polyester
- waschbar bei 60°C

Größe:

- 1 (normale Hände)
- 2 (große Hände)