

EVAKUIERUNGSTUCH *Järven*



Das *Järven* Evakuierungstuch macht es möglich, im Bett liegende Patient/Innen auf schnelle und sichere Weise zu evakuieren. Das Tuch kann zur Evakuierung auf geraden Flächen und auch über Treppen verwendet werden. Durch das ergonomische Design und dem stabilen Material gleitet es leicht auf trockenem und auch auf nassem Untergrund. Für Teppichböden bietet wir in Zusammenarbeit mit der Firma *Järven* spezielle Lösungen an. Das *Järven* Evakuierungstuch ist mit 4 seitlichen Griffen ausgestattet, damit es so beweglich wie möglich ist. Eine einfache und sichere Hilfe für die Evakuierung von nicht gehfähigen Patient/Innen und Bewohner/Innen ist daher gewährleistet.

- Größe: 90 x 200 cm
- Material: Polyamid/Polyester
- Farbe: hellblau mit orangefarbenen Gurten
- Aufbereitung: bis 90°C waschbar und desinfizierbar, Trocknergeeignet bis 70°C
- belastbar: bis 200 kg
- schwer entflammbar nach EN 597 1+2
- funktionsfähig mit allen Bettenmodellen und vorhandenen Pflegematratten
- Bedienung durch eine Person
- voll recycelbar, eine Demontage ist nicht nötig

Kurzanleitung:

Set Up/Installation: Matratze auf das Evakuierungstuch *Järven* legen und mit vier Eckbändern fixieren. Die seitlichen Klettverschlüsse müssen 5 cm vorstehen.

Evakuierung:

- Patient/In mit Gurten fixieren (wir empfehlen eine zusätzliche Polsterung des Oberkörpers mit dem Kopfkissen unter dem oberen Sicherungsgurt)
- Griffe am Fußende greifen und Patient/In seitlich aus dem Bett ziehen
- mit den Füßen voran ziehen und evakuieren