

**R H O M B O
M E D I C A L**

Die Ruhe, die beweglich hält.®



RHOMBO-MEDICAL® KISSEN & AUFLAGEN

**zur Dekubitusprophylaxe & -Therapie
zur aktivierenden Pflege
für mehr Liege- und Sitzkomfort**



Die Ruhe, die beweglich hält.®

Dekubitusprophylaxe und Dekubitustherapie
Intensivpflege auf Intensivstationen
Demenzpflege und Demenzpflegebetreuung
Hospizen und Palliativstationen

Übersicht
Inhalts-
verzeichnis



Die Ruhe, die beweglich hält.®

RHOMBO-MEDICAL® ist die Marke hochwertiger Medizinprodukte rund um die Themen gesundes Liegen, Lagern und Sitzen.

Die Entwicklung der **RHOMBO-MEDICAL® Produkte** basiert auf fundierten Erkenntnissen und Erfahrung der professionellen Pflege. Speziell das Konzept der Aktivierung in der Altenpflege findet sich in den Produkten wieder und trägt dazu bei, dass Menschen so lange wie möglich ein selbstbestimmtes, aktives Leben führen.

RHOMBO-MEDICAL® Produkte bewähren sich seit Jahrzehnten im Bereich der prophylaktischen und/oder therapeutischen Anwendungen in Kliniken, Pflegeheimen, Rehabilitationseinrichtungen und in der häuslichen Krankenpflege.

Vertrauen auch Sie den professionellen **RHOMBO-MEDICAL®-Produkten** und erleben Sie „Die Ruhe, die beweglich hält“.



CE-KENNZEICHEN
Medizinprodukte

Die Kennzeichnung dokumentiert, dass Waren den hohen Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen gem. MDR 2017/745 der Europäischen Union entsprechen und steht für zuverlässige Produktsicherheit.



OEKO-TEX
Standard 100

Geprüft nach Öko-Tex Standard 100 bedeutet, dass das Produkt auf eine Reihe von insgesamt 100 Schadstoffen, optische Aufheller oder ähnliches getestet wurde. Die Prüfkriterien sind weltweit einheitlich.

	Seite		Seite
Die Marke RHOMBO-MEDICAL®	2-3	Rhombo-medical® Bobath Kissenset	36
Unsere Füllmaterialien		Rhombo-medical® Grundlagerungs-Set	38
Rhombo-fill® und Rhombo-med®	5	Rhombo-medical® Kissenbett-Set	39
Übersicht der Lagerungskissen nach Körperzonen	6-7	Rhombo-medical® Kinästhetik-Set I	40
Rhombo-med® Sensorolle	10	Rhombo-medical® Kinästhetik-Set II	41
Rhombo-med® runde Rolle	11	Rhombo-medical® AVT-Prophylaxe-Set	42
Rhombo-fill® ovale Rolle	12	Rhombo-medical® Atemunterstützendes Set	43
Rhombo-fill® Komfortkissen	13	Rhombo-medical® Sensorollen-Set	44
Rhombo-med® Multikissen	14-15	Rhombo-fill® Anti-Dekubitus- u. Weichlagerungsüberzug	46
Rhombo-med® Flexionskissen	16-17	Rhombo-therm® Soft Sitzkissen	48
Rhombo-med® Lagerungskissen	18-19	Rhombo-fill® Kopfkissen	50
Rhombo-med® Lagerungskissen mit Seitenboden	20	Rhombo-fill® Nackenstützkissen	51
Rhombo-med® Rückenkissen mit Fahne	21	Rhombo-medical® Impression Decke	52
Rhombo-fill® Universalkissen	22-23	Übersicht der Schutzbezüge und Materialien	54-55
Rhombo-med® Entspannungskissen	24	Ausblick – Matratzen für Pflegebetten	56-57
Rhombo-fill® Sitzring	25	Qualitäts- und Umweltmanagement	58-59
Rhombo-med® HWS-Zervikal-Ring	26		
Rhombo-med® Universalhörnchen	27		
Rhombo-fill® Ohrfreilagerungsring	28		
Rhombo-fill® Lagerungsring	29		
Postionsunterstützung nach Klein	30		
Rhombo-med® Rhombi	31		
Rhombo-med® Armrampe	32		
Rhombo-med® Unterschenkelmanschette	33		
Rhombo-med® Venenkissen	34		
Rhombo-med® Stufenbettkissen	35		

Füllmaterialien Kissen & Auflagen

RHOMBO-MEDICAL® bietet professionelle
Produkte zur Dekubitusintervention

**R H O M B O
M E D I C A L**

Die Ruhe, die beweglich hält.®

Ideal im
Pflegealltag

Dekubitusintervention
Dekubitusprophylaxe
Dekubitustherapie



Auf die Inhalte kommt es an!

Rhombo-fill® – speziell entwickelt zur druckentlastenden Weichlagerung. Rhombo-fill® ist das in der Krankenpflege bewährte Füllmaterial in Form von rhombisch geschnittenen PUR-Luftzellen-Stäbchen aus einem hypersoftem Schaumstoff mit einem Raumgewicht von 40 kg/m³ in RHOMBO-MEDICAL® Kissen und Auflagen.

Rhombo-med® – das in der Krankenpflege bewährte Füllmaterial für Spezial-Kissen zur stabilisierenden Positionierung und Entlastungslagerung von zu pflegenden Menschen. Rhombo-med® besteht aus Rhombo-fill® Luftzellenstäbchen kombiniert mit Polster-Perlen aus Polypropylen. Das fließende Füllmaterial Rhombo-med® schmiegt sich perfekt an die Körperkontur an und stützt den Körper.

Rhombo-fill® Rhombo-med®

*Soft und elastisch.
Luftzellenstäbchen mit dem Rhombenschnitt.*

- druckentlastend
- stützend
- atmungsaktiv
- dauerelastisch
- temperatenausgleichend
- feuchtigkeitsausgleichend
- strapazierfähig
- allergieneutral
- langlebig
- bis 95° waschbar

*Anschmiegsam und stützend.
Luftzellenstäbchen mit Polsterperlen.*

- positionsstabilisierend
- anschmiegsam
- atmungsaktiv
- bewegungsunterstützend
- temperatenausgleichend
- feuchtigkeitsausgleichend
- strapazierfähig
- allergieneutral
- langlebig
- bis 95° waschbar



Die richtigen Lagerungshilfsmittel

Übersicht der Lagerungskissen nach Körperzonen

Produkte zum Positionieren

Unterstützen folgende Pflegekonzepte:
Kinästhetik, Bobath
Basale Stimulation, Mikrolagerung



Körperzonen		Empfehlung	Seite
Kopf		Kopfkissen, Nackenstützkissen Universalhörnchen HWS-Zervikal-Ring	50-51 27 26
Ohr		Ohrfreilagerungsring Kopfkissen 35 x 40 cm Universalhörnchen Lagerungsring	28 30 27 29
Hals		Kopfkissen Nackenstützkissen Universalhörnchen Ovale Rolle Halbrolle Rhombi	50 51 27 12 30 31
Schulter		Lagerungskissen 25 x 80 cm Nackenstützkissen Universalhörnchen Ovale Rolle Halbrolle Rhombi	18 51 27 12 30 31
Arm		Rolle zur Positionsunterstützung 100 cm Lagerungskissen 45 x 90 cm Multikissen (gekammertes Beinkissen) Entspannungskissen Armrampe	8 18 14 24 32
Hand		Universalkissen 23 x 40 cm Halbrolle Rhombi	22 30 31
Lunge		Kopfkissen 80 x 80 cm Rolle zur Positionsunterstützung 220 cm Lagerungskissen 25 x 80 cm	50 8 18
Körper		Im-Pression Anti-Dekubitus-Überzug Anti-Dekubitus und Weichlagerungsauflage Universalkissen 25 x 80 cm Rolle zur Positionsunterstützung 220 cm Sensorolle	52 46 46 12 8 10
Oberkörper		Kopfkissen 80 x 80 cm Rolle zur Positionsunterstützung 220 cm Rückenstützkissen mit Fahne Universalkissen 25 x 80 cm und 45 x 80 cm Venenkissen	50 8 21 22 34

Körperzonen		Empfehlung	Seite
Hüfte		Universalhörnchen Ovale Rolle Lagerungskissen 20 x 30 cm Multikissen (gekammertes Beinkissen) Lagerungsring, Keil, Rhombi	27 12 18 14 29-31
Steißbein		Anti-Dekubitus-Betteinlage Anti-Dekubitus und Weichlagerungsauflage Universalhörnchen Sitzring Komfortkissen (Gesäßkissen) Rolle zur Positionsunterstützung 220 cm	46 46 27 25 50 8
Sitzbein		Universalhörnchen Komfortkissen (Gesäßkissen) Entspannungskissen Sitzring Rolle zur Positionsunterstützung 100 cm, Halbrolle	27 50 24 25 8
Gesäß		Anti-Dekubitus-Betteinlage Sitzring Komfortkissen (Gesäßkissen) Universalkissen 45 x 80 cm Sitz- und Rollstuhlkissen	46 28 50 22 48
Oberschenkel		Lagerungskissen 45 x 90 cm Lagerungskissen mit Seitenboden	18 20
Knie		Ovale Rolle Runde Rolle Multikissen (gekammertes Beinkissen) Rhombi	12 11 14 31
Ferse		Lagerungsring Multikissen (gekammertes Beinkissen) Unterschenkelmanschette Rhombi	29 14 33 31
Fuß		Universalkissen 25 x 80 cm Multikissen (gekammertes Beinkissen) Unterschenkelmanschette Rhombi	22 14 33 31
Bein		Rolle zur Positionsunterstützung 220 cm Lagerungskissen mit Seitenboden Multikissen (gekammertes Beinkissen) Venenkissen Sensorolle	8 20 14 34 10
Wirbelsäule		HWS-Zervikal-Ring Stufenbettkissen Venenkissen	26 35 34

Die Kinästhetik

Rhombomed® Rolle zur Positionsunterstützung

Die Ruhe, die beweglich hält.®
RHOMBO MEDICAL

- Kinästhetische Lagerung
- Basale Stimulation
- Zur unterstützenden und stabilisierenden Lagerung
- Fördert die Eigenbewegung und Körperwahrnehmung



Die Rhombo-med® Rolle zur Positionsunterstützung wird bevorzugt im Rahmen des kinästhetischen Handlungskonzepts eingesetzt. Sie ermöglicht vielfältige stabilisierte Lagerungen des zu pflegenden Menschen, lässt seine Eigenbewegungen zu und fördert die Wahrnehmung des Körpers. Die Rhombo-med® Rolle zur Positionsunterstützung ist in drei verschiedenen Längen erhältlich und kochwaschbar bei 95°C.

Bezug		Robuster Oberstoff in Körperbindung 50 % Baumwolle und 50 % Polyester		Verarbeitung	Sicherheitsnähte praktischer Tragegriff eingearbeiteter Seitenboden	
Füllung		Original Rhombo-med®				
Größe in cm	Art.Nr. Kissen	Hilfsmittelnr.	Passende Schutzbezüge zum Kissen inkl. Reißverschluss <i>*Detailbeschreibungen siehe Seite 54</i>			
			Schutzbezug Baumwolle	PU-Schutzbezug Semy	Schutzbezug Climate Soft®	
Ø 20 x 100	46.100	11.11.05.1006	51.101	59.101	50.101	
Ø 20 x 180	46.180	11.11.05.2013	51.180	59.180	50.180	
Ø 20 x 220	46.200	11.11.05.2013	51.201	59.201	50.201	

CE

MD


OEKO TEX®
STANDARD 100
A20-1001
Hohenstein

ANWENDUNGEN

Beispiele



Darstellung der Größe 20 x 100 cm inklusive PU-Schutzbezug Semy

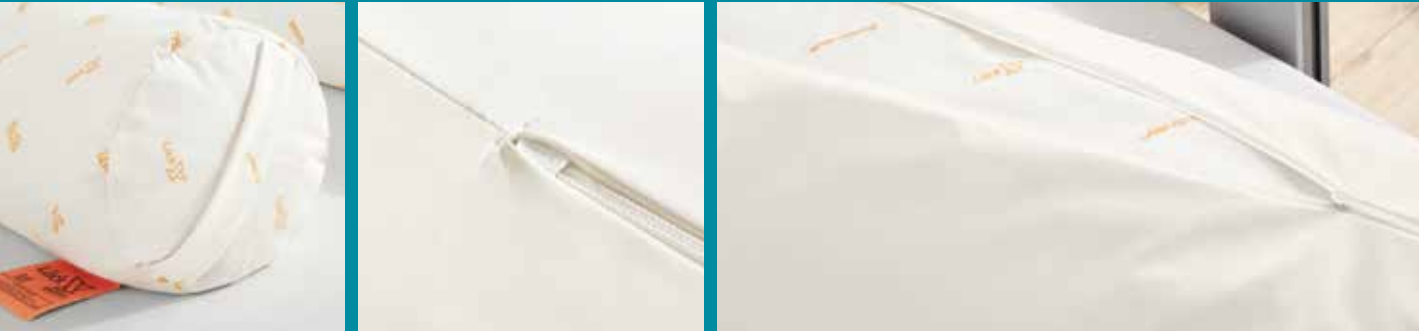

Praktischer Tragegriff

PU-Schutzbezug Semy mit verdecktem Reißverschluss

PU-Schutzbezug Semy abnehmbar


Die Basale Stimulation Rhombomed® Sensorolle

- Die Ruhe, die beweglich hält.®
- RHOMBO MEDICAL**
- Vielseitig einsetzbar
 - Kinästhetische Lagerung
 - Basale Stimulation
 - Zur unterstützenden und stabilisierenden Lagerung
 - Fördert die Eigenbewegung und Körperwahrnehmung



Die Rhombomed® Sensorolle wird bevorzugt im Rahmen der Basalen Stimulation eingesetzt. Sie lässt sich aufgrund ihrer Form leicht und flexibel an die Körperkontur anmodellieren. Sie dient bei bettlägerigen Menschen dazu, einen Verlust der Wahrnehmung des eigenen Körpers vorzubeugen. Die Sensorolle hilft den eigenen Körper zu spüren und fördert die Wahrnehmung in den Grenzbereichen des Körpers. Die Rhombomed® Sensorollen sind in zwei verschiedenen Längen lieferbar und sind kochwaschbar.

Bezug	Robuster Oberstoff in Körperbindung 50 % Baumwolle und 50 % Polyester	Verarbeitung	Sicherheitsnähte praktischer Tragegriff eingearbeiteter Seitenboden		
Füllung	Original Rhombo-med®				
Größe in cm	Art.Nr. Kissen	Passende Schutzbezüge zum Kissen inkl. Reißverschluss <i>*Detailbeschreibungen siehe Seite 54</i>			
		Schutzbezug Baumwolle	PU-Schutzbezug Semy	Schutzbezug Climate Soft®	
Ø 12 x 140	46.500	51.501	59.501	50.501	
Ø 12 x 250	46.600	51.601	59.601	50.601	

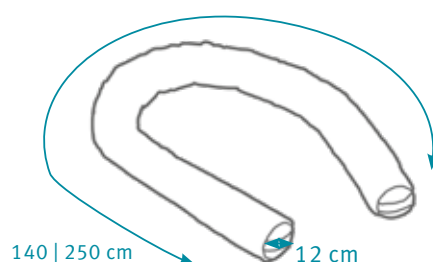

ANWENDUNGEN Beispiele




Die unterstützende Rhombomed® runde Rolle

- Zur stützenden und stabilisierenden Lagerung einzelner Körperpartien



Die Rhombomed® runde Rolle dient zur stützenden und stabilisierenden Lagerung einzelner Körperpartien. Insbesondere in der Rückenlage kann die runde Rolle unter die Knie positioniert werden, um die Wirbelsäule zu entlasten und ein Hohlkreuz zu vermeiden. Die Rhombomed® runde Rolle ist kochwaschbar.

Bezug	Robuster Oberstoff in Körperbindung 50 % Baumwolle und 50 % Polyester	Verarbeitung	Sicherheitsnähte runde Seitenböden		
Füllung	Original Rhombo-med®				
Größe in cm	Art.Nr. Kissen	Passende Schutzbezüge zum Kissen inkl. Reißverschluss *Detailbeschreibungen siehe Seite 54			
		Schutzbezug Baumwolle	PU-Schutzbezug Semy	Schutzbezug Climate Soft	
Ø 18 x 55	42.983	51.183	59.183	50.183	

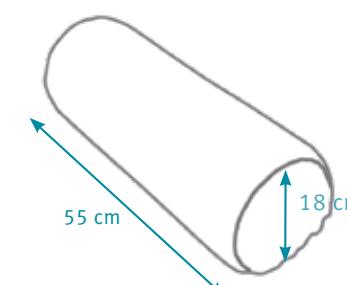

ANWENDUNGEN Beispiele



Die mehrdimensionale Rhombo-fill® ovale Rolle

Die Ruhe, die beweglich hält.® **RHOMBO MEDICAL**


■ Zur lokalen Weichlagerung einzelner Körperteile
■ Kontrakturenprophylaxe



Die Rhombo-fill® ovale Rolle dient optimal zur Weichlagerung einzelner Körperpartien. Aufgrund der ovalen Kissenform ist die Rhombo-fill® ovale Rolle in mehreren Dimensionen anwendbar wie z.B. flachliegend oder auch hochformatig. Die Rhombo-fill® ovale Rolle kann sehr gut zur Kontrakturen-prophylaxe eingesetzt werden. Die Rhombo-fill® ovale Rolle ist kochwaschbar.


Bezug			Verarbeitung		
Robuster Oberstoff in Körperbindung 50 % Baumwolle und 50 % Polyester			Sicherheitsnähte ovaler Seitenboden		
Füllung			Original Rhombo-fill®		
Größe in cm	Art.Nr. Kissen	Hilfsmittelnr.	Passende Schutzbezüge zum Kissen inkl. Reißverschluss *Detailbeschreibungen siehe Seite 54		
			Schutzbezug Baumwolle	PU-Schutzbezug Semy	Schutzbezug Climate Soft®
Ø 14 x 22 x 55	32.781	11.11.05.1008	51.081	59.081	50.081

Anwendungsbeispiele

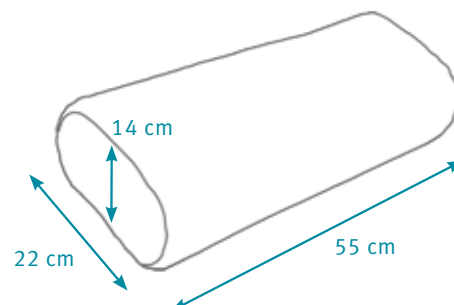

ANWENDUNGEN

Beispiele

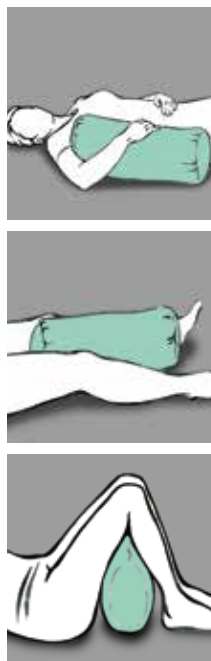

Die Weich- & Freilagerung Rhombo-fill® Komfortkissen


Die Ruhe, die beweglich hält.® **RHOMBO MEDICAL**

■ Weichlagerung und partielle Freilagerung
■ Einsetzbar in Sitz- und Liegeposition
■ Vielseitig verwendbar z.B. Hämorrhoiden, Analläsionen, nach gyn. OP, Kachexie (im Sitzen), Skoliose, Dekubitusprophylaxe im Steißbereich




Das Rhombo-fill® Komfortkissen wurde zur Weichlagerung des Gesäßes entwickelt. Die speziell geformte Aussparung dient zur Freilagerung der gefährdeten Region in Liege- oder Sitzposition. Auch hervorragend als Rückenkissen im Sitzen geeignet zum Schutz der Wirbelsäule vor Druckbelastungen. Das Rhombo-fill® Komfortkissen ist kochwaschbar.

Bezug			Verarbeitung		
Robuster Oberstoff in Körperbindung 50 % Baumwolle und 50 % Polyester			Sicherheitsnähte intelligente Aussparung		
Füllung			Original Rhombo-fill®		
Größe in cm	Art.Nr. Kissen	Hilfsmittelnr.	Passende Schutzbezüge zum Kissen inkl. Hotelverschluss *Detailbeschreibungen siehe Seite 54		
			Schutzbezug Baumwolle	PU-Schutzbezug Semy	Schutzbezug Climate Soft®
60 x 75	33.132	11.11.05.1002	51.032	59.032	50.032

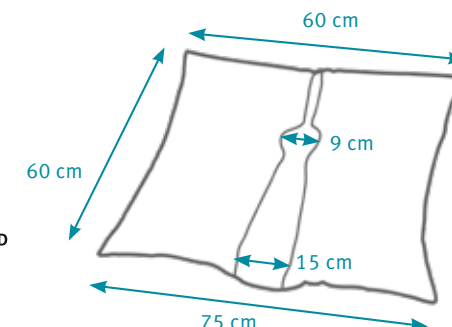

ANWENDUNGEN

Beispiele

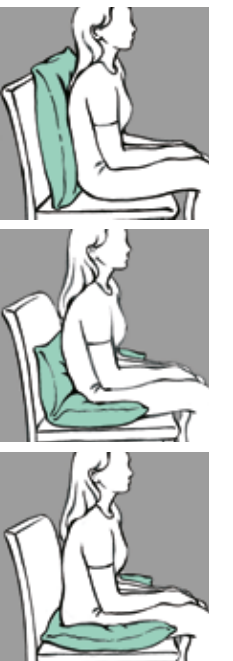

Das Frei- & Hochlagern Rhombomed® Multikissen




- Multifunktional einsetzbar
- Hochlagern von Extremitäten
- Einsetzbar zur Um- und Freilagerung sowie zur unterstützenden Lagerung
- Bobath-Lagerung



Das Rhombomed® Multikissen ist aufgrund seiner gekammerten Form sehr flexibel und multifunktional einsetzbar, ob zur Rolle geformt oder aufgeschüttelt als Rampe, zur Verwendung für die Arm-, Rücken- und Beinpartie. Perfekt geeignet zum Hochlagern und/oder Freilagern von Armen, Beinen und Fersen. Das Rhombomed® Multikissen ist kochwaschbar.

Bezug		Robuster Oberstoff in Körperbindung 50 % Baumwolle und 50 % Polyester		Verarbeitung		Sicherheitsnähte Vier gleiche, getrennte Kammern	
Füllung		Original Rhombo-med®					
Größe in cm		Art.Nr. Kissen	Hilfsmittelnr.	Passende Schutzbezüge zum Kissen inkl. Hotelverschluss <i>*Detailbeschreibungen siehe Seite 54</i>			
				Schutzbezug Baumwolle	PU-Schutzbezug Semy	Schutzbezug Climate Soft®	
75 x 75		43.077	11.11.05.1040	51.077	59.077	50.077	

ANWENDUNGEN Beispiele

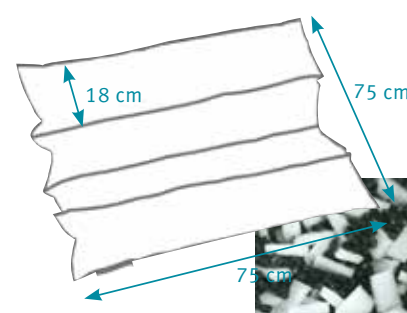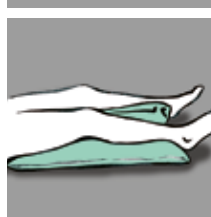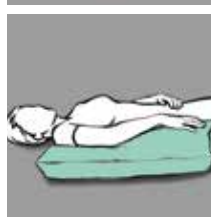

Darstellung Rhombomed® Multikissen mit abwaschbaren PU-Schutzbezug Semy



Detail: Flexible Kammern des Multikissens



PU-Schutzbezug Semy mit
Hotelverschluss geöffnet



PU-Schutzbezug Semy mit
Hotelverschluss geschlossen

Das komfortable
Rhombomed®
Flexionskissen

Die Ruhe, die beweglich hält.® **RHOMBO MEDICAL**

- Zur idealen Unterstützung des Oberkörpers (Kopf, Schultern, Brustkorb, Arme)
- Verhindert die Streckung des Nackens in der Rückenlage
 - In vielseitigen Positionen einsetzbar: Rückenlage, 30° Position, 90° Seitenlage




Das Rhombomed® Flexionskissen ist ein multifunktionales Kissen für verschiedene Körperbereiche. Das Positionierungskissen ist dezent ansteigend gearbeitet mit einer mittigen Aussparung zur komfortablen Aufnahme des gesamten Oberkörpers inkl. des Kopfes und seitlichen ergonomisch angepassten Armauflagen. Es erleichtert die Beugung von Kopf und Schultern und fördert so eine natürliche, physiologische Beugung des Kopfes nach vorne. Die Überstreckung des Nackens in Rückenlage und einer damit verbundenen Verkürzung der Nackenmuskulatur wird dahingehend entgegengesetzt. Durch die gebeugte Kopfhaltung wird das Schlucken in Rückenlage erleichtert und das Risiko des Verschluckens (Aspiration) verringert. Es fördert eine gute Körperausrichtung, indem es die Ausrichtung der oberen Schlüsselpunkte (Kopf, Schultern, Brustbein) in einer neutralen Position (A-Position nach Bobath) unterstützt.

Eine weitere Anwendung sieht die Positionierung der unteren Extremitäten, unterstützt durch die seitlichen Auflieger, vor. Bei Unterstützung der Oberschenkel wird eine Druckentlastung im Hüftbereich gefördert. Bei Unterstützung der Unterschenkel wird eine Freilagerung der Fersen erzeugt.

Bezug	Robuster Oberstoff in Körperbindung 50 % Baumwolle und 50 % Polyester	Verarbeitung	Sicherheitsnähte
Füllung	Original Rhombomed®		
Größe in cm	Art.Nr. Kissen	Passende Schutzbezüge zum Kissen inkl. Reißverschluss <i>*Detailbeschreibungen siehe Seite 54</i>	
		Schutzbezug Baumwolle	PU-Schutzbezug Semy
65 x 50 x 25cm	43.686	51.686	59.686
			Schutzbezug Climate Soft®
			50.686

ANWENDUNGEN
Beispiele

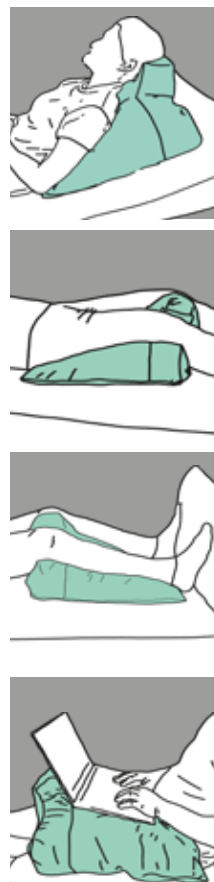

Die Ruhe, die beweglich hält.® **RHOMBO MEDICAL**



Nackenstütze des Kissens



Komfortable Armauflagen



Kissenbezug mit verdeckten Reißverschluss auf der Rückseite unten

Das vielseitige
Rhombo-med®
Lagerungskissen

Die Ruhe, die beweglich hält.® **RHOMBO MEDICAL**



- Vielseitig einsetzbar
- Stabilisierende Lagerung
- Möglichkeit der Hochlagerung
- Fördert die Körperwahrnehmung



Das Rhombo-med® Lagerungskissen ist vielseitig einsetzbar wie z. B. zur stabilisierenden Lagerung, zur unterstützenden Lagerung oder zum Hochlagern von Gliedmaßen. Das Rhombo-med® Lagerungskissen ist wahlweise in sieben verschiedenen Größen erhältlich. Das Rhombo-med® Lagerungskissen ist kochwaschbar.

Bezug		Verarbeitung		Sicherheitsnähte	
Robuster Oberstoff in Körperbindung 50 % Baumwolle und 50 % Polyester					
Füllung		Original Rhombo-fill®			
Größe in cm	Art.Nr. Kissen	Hilfsmittelnr.	Passende Schutzbezüge zum Kissen inkl. Hotelverschluss <i>*Detailbeschreibungen siehe Seite 54</i>		
			Schutzbezug Baumwolle	PU-Schutzbezug Semy	Schutzbezug Climate Soft®
20 x 30	40.202	11.11.05.1011	51.002	59.002	50.002
25 x 80	40.205	11.11.05.1011	51.005	59.005	50.005
30 x 40	40.206	11.11.05.1011	51.006	59.006	50.006
40 x 60	40.218	11.11.05.1011	51.118	59.118	50.118
40 x 80	40.219	11.11.05.1011	51.019	59.019	50.019
45 x 90	40.275	11.11.05.1011	51.075	59.075	50.075
50 x 70	40.226	11.11.05.1011	51.026	59.026	50.026

ANWENDUNGEN
Beispiele

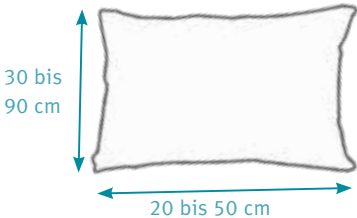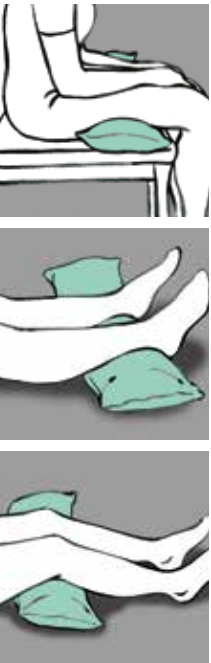

Rhombo-med® Lagerungskissen mit
Baumwoll-Schutzbezug



Rhombo-med® Lagerungskissen
mit PU-Schutzbezug Semy



Rhombo-med® Lagerungskissen
mit Climate Soft®-Schutzbezug



Rhombo-med® Lagerungskissen
mit abwaschbarem PU-Schutz-
bezug Semy und sichtbarem
Hotelverschluss offen



Rhombo-med® Lagerungskissen
mit abwaschbarem PU-Schutz-
bezug Semy und sichtbarem
Hotelverschluss

Das große Rhombo-med® Lagerungskissen mit Seitenboden

- Stabilisierende Positionierung
- Besonders langes Kissen zum Lagern
- Fördert die Körperwahrnehmung




Das große Rhombo-med® Lagerungskissen mit Seitenboden ist besonders lang und voluminös. Es eignet sich deshalb besonders gut zum stabilisierenden Lagern des gesamten Beines wie z. B. in der 135° Lage. Das Rhombo-med® Lagerungskissen mit Seitenboden ist kochwaschbar.

ANWENDUNGEN Beispiele



Bezug	Robuster Oberstoff in Körperbindung 50 % Baumwolle und 50 % Polyester		Verarbeitung	Sicherheitsnähte mit Seitenboden	
Füllung	Original Rhombo-med®				
Größe in cm	Art.Nr. Kissen	Hilfsmittelnr.	Passende Schutzbezüge zum Kissen inkl. Hotelverschluss <i>*Detailbeschreibungen siehe Seite 54</i>		
			Schutzbezug Baumwolle	PU-Schutzbezug Semy	Schutzbezug Climate Soft®
55 x 90	42.876	11.11.05.1010	51.076	59.076	50.076

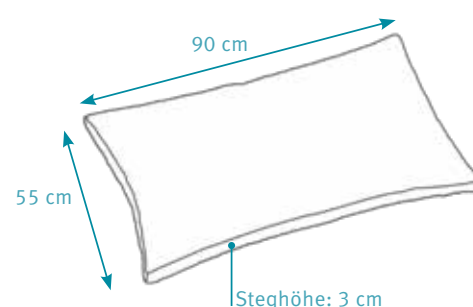

Das durch Eigengewicht gesicherte Rhombo-med® Rückenkissen mit Fahne

- Positionierung in 30°-Lage
- Stabilisierende Positionierung




Das Rhombo-med® Rückenstützkissen mit Fahne wurde speziell zur stabilisierenden Positionierung in 30°-Lage entwickelt. Der zu pflegende Mensch liegt dabei auf der Kissenfahne und sichert mit seinem eigenen Körpergewicht das Kissen vor dem Verrutschen. Das Rhombo-med® Rückenstützkissen mit Fahne ist kochwaschbar.

ANWENDUNGEN Beispiele



Detail: Fahne

Bezug		Robuster Oberstoff in Körperbindung 50 % Baumwolle und 50 % Polyester		Verarbeitung	Sicherheitsnähte mit Fahne
Füllung		Original Rhombo-med®			
Größe in cm	Art.Nr. Kissen	Hilfsmittelnr.	Konstruktionsbedingt ist für dieses Kissen kein Schutzbezug lieferbar.		
80 x 60	41.934	11.11.05.1007	-	-	-
90 x 65	41.937	11.11.05.1007	-	-	-

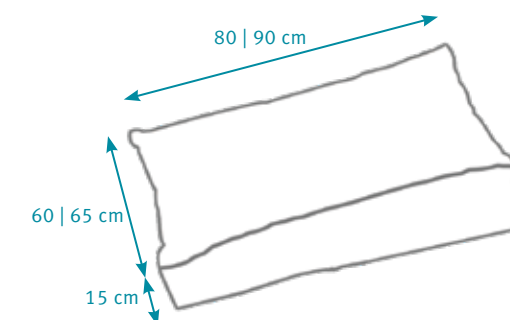

Das vielseitige

Rhombο-fill®

Universalkissen

Die Ruhe, die beweglich hält.®

RHOMBO MEDICAL

■ Vielseitig einsetzbar

■ Weich- und Freilagerung

■ Umlagerung




Das Rhombo-fill® Universalkissen ist optimal voluminös aufgrund des eingearbeiteten Seitenbodens. Es bietet eine gute druckverteilende, weich-elastische Unterstützung. Das Kissen kann vielfältig zur druckentlastenden Weich- oder Freilagerung verwendet werden. Das Rhombo-fill® Universalkissen ist wahlweise in vier verschiedenen Größen erhältlich. Das Rhombo-fill® Universalkissen ist kochwaschbar.

Bezug			Verarbeitung		
Robuster Oberstoff in Körperbindung 50 % Baumwolle und 50 % Polyester			Sicherheitsnähte mit Seitenboden		
Füllung					
Original Rhombo-fill®					
Größe in cm	Art.Nr. Kissen	Hilfsmittelnr.	Passende Schutzbezüge zum Kissen inkl. Hotelverschluss <i>*Detailbeschreibungen siehe Seite 54</i>		
			Schutzbezug Baumwolle	PU-Schutzbezug Semy	Schutzbezug Climate Soft®
23 x 40	32.804	11.11.05.1009	51.004	59.004	50.004
25 x 80	32.805	11.11.05.1009	51.105	59.105	50.105
40 x 60	32.818	11.11.05.1009	51.018	59.018	50.018
45 x 80	32.823	11.11.05.1009	51.023	59.023	50.023

ANWENDUNGEN

Beispiele

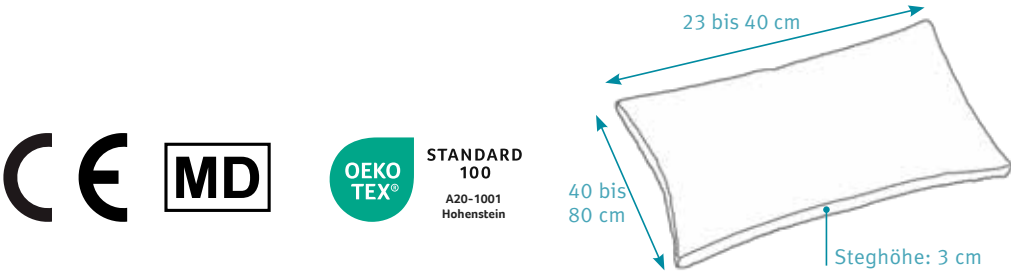

Die Ruhe, die beweglich hält.®

RHOMBO MEDICAL



Detail: Seitenboden

Universalkissen



Universalkissen mit Baumwoll-

Schutzbezug



Universalkissen mit Climate

Soft®-Schutzbezug



Universalkissen mit abwaschba-

rem PU-Schutzbezug Semy und

sichtbarem Hotelverschluss

geschlossen

Das komfortable
Rhombomed®
Entspannungskissen

Die Ruhe, die beweglich hält.® **RHOMBO MEDICAL**

- Sehr gute Körperanpassung
- Kann das Wohlbefinden fördern
- Unterstützung der Wahrnehmung




Das Rhombomed® Entspannungskissen kann durch seine gekrümmte Form sehr flexibel an unterschiedlichen Positionen des Körpers eingesetzt werden. Insbesondere unter den Arm gelegt, kann es Geborgenheit vermitteln. Doch das Kissen kann durch seine Form auch zwischen den Knien positioniert werden oder im Rücken platziert werden, um die nötige Unterstützung zu gewährleisten. Das Rhombomed® Entspannungskissen ist kochwaschbar.

ANWENDUNGEN
Beispiele



Bezug	Robuster Oberstoff in Körperbindung 50 % Baumwolle und 50 % Polyester	Verarbeitung	Sicherheitsnähte bogenförmig		
Füllung	Original Rhombo-med®				
Größe in cm	Art.Nr. Kissen	Passende Schutzbezüge zum Kissen inkl. Hotelverschluss <i>*Detailbeschreibungen siehe Seite 54</i>			
		Schutzbezug Baumwolle	PU-Schutzbezug Semy	Schutzbezug Climate Soft®	
30 x 65	46.700	51.701	59.701	50.701	

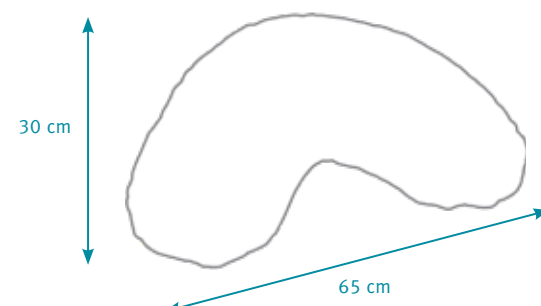

Der tragfähige
Rhombofill®
Sitzring


Die Ruhe, die beweglich hält.® **RHOMBO MEDICAL**

- Weich- bzw. lokale Freilagerung
- Druckentlastung im Gesäßbereich
- in zwei Varianten erhältlich




Der Rhombofill® Sitzring dient zur lokalen Druckentlastung im Gesäßbereich. Der Sitzring wird, abhängig vom Körpergewicht des Anwenders, in zwei Volumengrößen angeboten. Die Konstruktion unterscheidet sich dahingehend, dass bei einem Körpergewicht ab 60 kg der Sitzring mit Seitenböden innen und außen gefertigt ist. Der Sitzring für Anwender unter 60 kg ist nur mit einem dezenten inneren Seitenboden versehen. Dieser Sitzring ist insgesamt weniger hoch. Beide Varianten des Rhombofill® Sitzrings sind kochwaschbar.

ANWENDUNGEN
Beispiele

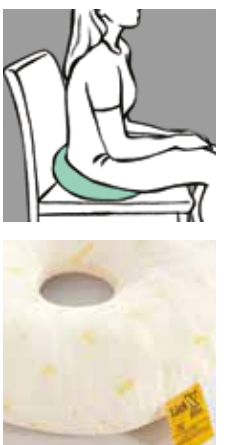

Bezug	Robuster Oberstoff in Körperbindung 50 % Baumwolle und 50 % Polyester	Verarbeitung	Sicherheitsnähte nur Seitenböden innen bis 60 kg Seitenböden innen + außen ab 60 kg		
Füllung	Original Rhombo-fill®				
Größe in cm		Art.Nr. Kissen	Passende Schutzbezüge zum Kissen inkl. Reißverschluss <i>*Detailbeschreibungen siehe Seite 54</i>		
			Schutzbezug Baumwolle	PU-Schutzbezug Semy	Schutzbezug Climate Soft
ab 60 kg außen: Ø 50 innen: Ø 13 cm Höhe: 13 cm		31.188	51.188	59.188	50.188
bis 60 kg außen: Ø 50 innen: Ø 13 Höhe: 10 cm		31.088	51.088	59.088	50.088

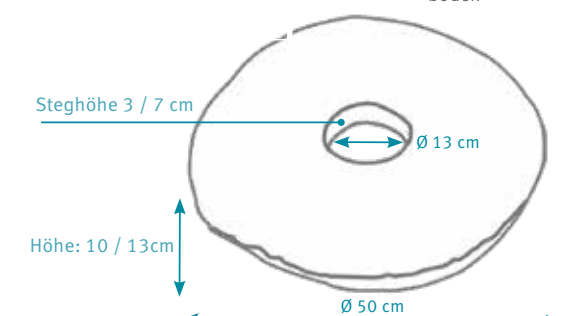

Der stabilisierende
Rhombo-med®
HWS-Zervikal-Ring


Die Ruhe, die beweglich hält.® **RHOMBO MEDICAL**

- Zur Ruhigstellung von Kopf und Nacken
- Zur Freilagerung von Kopf und Nacken
- Stabilisierung und Unterstützung der Halswirbelsäule




Der Rhombo-med® HWS-Zervikal-Ring dient zur weitreichenden Ruhigstellung des Kopfes und des Nackenbereichs in Rücken- und Seitenlage. Das Füllmaterial Rhombo-med® stabilisiert sanft und druckentlastend die Position von Kopf und Nacken. Die Mitte des Rhombo-med® HWS-Zervikal-Ring ist mit Innensteg gefertigt und schafft das notwendige Volumen für die optimale Unterstützung. Der Rhombo-med® HWS-Zervikal-Ring ist kochwaschbar.

ANWENDUNGEN
Beispiele

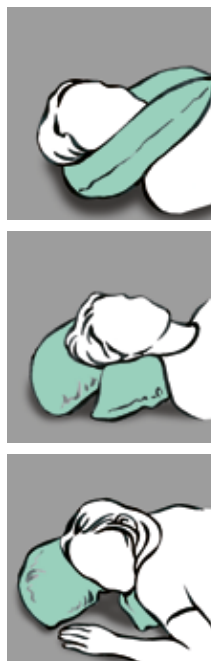

Bezug	Robuster Oberstoff in Körperbindung 50 % Baumwolle und 50 % Polyester	Verarbeitung	Sicherheitsnähte Seitenboden innen		
Füllung	Original Rhombo-med®				
Größe in cm		Art.Nr. Kissen		Passende Schutzbezüge zum Kissen inkl. Reißverschluss <i>*Detailbeschreibungen siehe Seite 54</i>	
		Schutzbezug Baumwolle	PU-Schutzbezug Semy	Schutzbezug Climate Soft®	
außen: Ø 50 innen: Ø 11		41.387	51.087	59.087	50.087

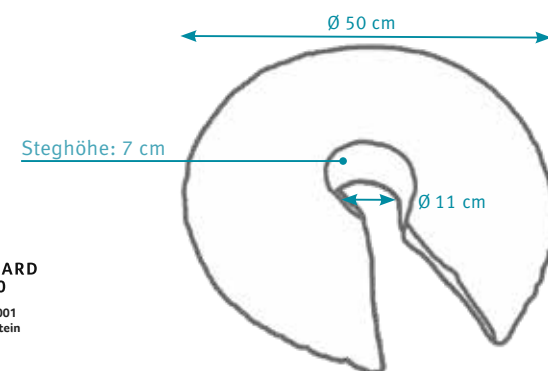

Das weiche
Rhombo-fill®
Universalhörnchen


Die Ruhe, die beweglich hält.® **RHOMBO MEDICAL**

- Zur Unterstützung verschiedener Körperbereiche
- Zur Weich- und Freilagerung




Das Rhombo-fill® Universalhörnchen ist ein ringförmiges Kissen mit einer Öffnung. Der innere Ring des Kissen ist als Innensteg konfektioniert, damit wird eine höhere Unterstützung in diesem Bereich erzielt, die sanft zu den Randbereichen überleitet. Es dient im Liegen als Nackenkissen zur Unterstützung der Halswirbelsäule. Das Rhombo-fill® Universalhörnchen kann auch zur Weichlagerung im Gesäßbereich eingesetzt werden oder zur partiellen Freilagerung. Das Rhombo-fill® Universalhörnchen ist kochwaschbar.

ANWENDUNGEN
Beispiele

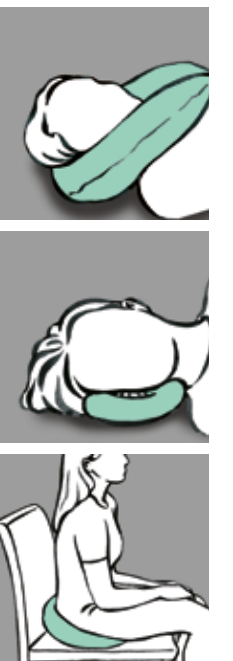

Bezug	Robuster Oberstoff in Körperbindung 50 % Baumwolle und 50 % Polyester	Verarbeitung	Sicherheitsnähte mit Seitenboden		
Füllung	Original Rhombo-fill®				
Größe in cm		Art.Nr. Kissen		Passende Schutzbezüge zum Kissen inkl. Reißverschluss <i>*Detailbeschreibungen siehe Seite 54</i>	
		Schutzbezug Baumwolle	PU-Schutzbezug Semy	Schutzbezug Climate Soft®	
außen: Ø 40 innen: Ø 16		32.586	51.086	59.086	50.086

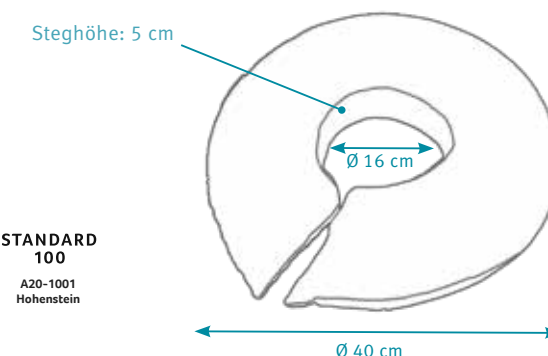

Der spezielle Rhombο-fill® Ohrfreilagerungsring

- Zur Freilagerung des Ohres in Seitenlage
- Einseitig begradigt zur optimalen Anpassung die Nacken-Schulterpartie




Dieser Rhombο-fill® Lagerungsring wurde speziell zur Druckentlastung der Ohrmuschel in Seitenlage entwickelt. Die Öffnung des Rhombο-fill® Ohrfreilagerungsring ist mit 15 cm Innendurchmesser besonders groß gearbeitet, so dass die komplette Ohrmuschel freigelagert werden kann. Das weiche Material schmiegt sich perfekt an das Seitenprofil von Kopf und Hals an. Der Lagerungsring ist einseitig begradigt zur optimalen Anpassung an die Schulterpartie. Der Rhombο-fill® Lagerungsring ist kochwaschbar.

ANWENDUNGEN Beispiele



Bezug	Robuster Oberstoff in Körperbindung 50 % Baumwolle und 50 % Polyester	Verarbeitung	Sicherheitsnähte mit Seitenboden, einseitig begradigt		
Füllung	Original Rhombo-fill®				
Größe in cm		Art.Nr. Kissen	Passende Schutzbezüge zum Kissen inkl. Reißverschluss <i>*Detailbeschreibungen siehe Seite 54</i>		
			Schutzbezug Baumwolle	PU-Schutzbezug Semy	Schutzbezug Climate Soft®
außen: Ø 30 innen: Ø 15		32.688	51.688	59.688	50.688

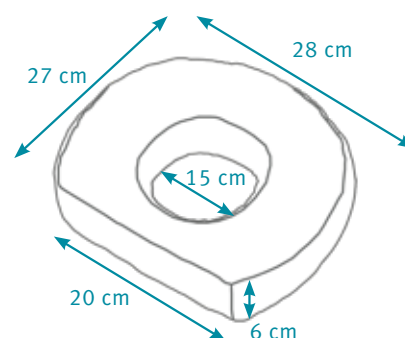


Der kleine Rhombο-fill® Lagerungsring

- Zur Weich- und Freilagerung einzelner, kleinerer Körperpartien




Der kleine Rhombο-fill® Lagerungsring dient zur lokalen Druckentlastung wie z. B. von Ferse, Knöchel, Ellenbogen, Knie, Hand und Ohr. Der Ring ist innen und außen mit einem Seitenboden hergestellt, der ihm Volumen und Stabilität verleiht. Der Rhombο-fill® Lagerungsring kann auch in der Seitenlage zwischen den Knien zur Druckentlastung eingesetzt werden sowie zur Druckentlastung der Schulter in der 135°-Lage. Bei besonderer Empfindlichkeit ist es empfehlenswert den Ring in Kombination mit einem Schutzbezug zu verwenden. Das Rhombο-fill® Lagerungsring ist kochwaschbar.

ANWENDUNGEN Beispiele

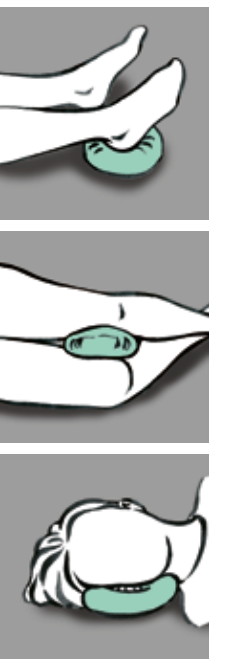

Bezug	Robuster Oberstoff in Körperbindung 50 % Baumwolle und 50 % Polyester	Verarbeitung	Sicherheitsnähte mit Seitenboden innen und außen		
Füllung	Original Rhombo-fill®				
Größe in cm		Art.Nr. Kissen		Passende Schutzbezüge zum Kissen inkl. Reißverschluss <i>*Detailbeschreibungen siehe Seite 54</i>	
		Schutzbezug Baumwolle	PU-Schutzbezug Semy	Schutzbezug Climate Soft®	
außen: Ø 20 innen: Ø 6		32.484	51.084	59.084	50.084

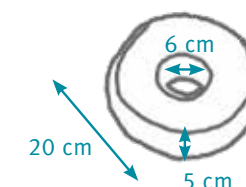

Anwendungsbeispiele



Positionsunterstützung nach Klein

- Zur Unterstützung beweglicher Körperpartien
z.B. Hüfte oder Schulter
- Mikrolagerung
- Kinästhetische Lagerung
- Fördert die Eigenbewegung und Körperwahrnehmung




Die Halbrolle nach Klein wird im Rahmen der Unterstützung und Freilagerung eingesetzt. Der Keil nach Klein wird bei der Mikrolagerung verwendet, um kleinste Schwerpunktverlagerungen am zu pflegenden Menschen zu erreichen. Besonderen Einsatz zeigt der Keil zur Unterstützung beweglicher Körperteile z.B. an der Hüfte oder an der Schulter. Auf diese Weise werden Mikrobewegungen des Körpers nachgeahmt, die der Druckentlastung dienen können. Diese Form der Lagerung fördert die Eigenbewegung der zu pflegenden Menschen und verbessert die Körperwahrnehmung. Die Halbrolle und der Keil sind jeweils kochwaschbar.

ANWENDUNGEN Beispiele



Bezug			Verarbeitung		
Robuster Oberstoff in Körperbindung 50 % Baumwolle und 50 % Polyester			Sicherheitsnähte		
Füllung			Polyurethanschäum		
Größe in cm	Art.Nr. Kissen	Hilfsmittelnr.	Passende Schutzbezüge zum Kissen inkl. Hotelverschluss *Detailbeschreibungen siehe Seite 54		
			Schutzbezug Baumwolle	PU-Schutzbezug Semy	Schutzbezug Climate Soft®
Halbrolle 25 x 9 x 4,5	46.300	11.11.05.1004	51.301	59.301	50.301
Keil 25 x 20 x 10	46.400	11.11.05.1003	51.401	59.401	50.401

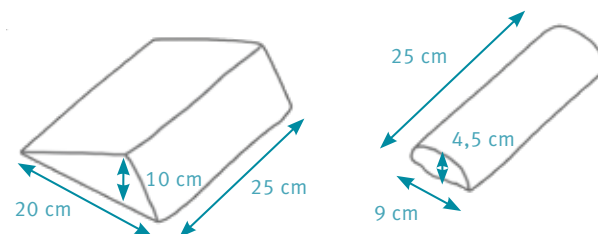


Rhomb-med® Rhombi

- Zum Unterlagern von Hohlräumen
- Ideales Kissen zur Mikrolagerung
- Basale Stimulation
- Fördert die Körperwahrnehmung




Das kleine Rhomb-med® Rhombi-Kissen eignet sich ideal zur Mikrolagerung oder zum Unterlagern von Hohlräumen. Die Form unterstützt in unterschiedlichen Positionen insbesondere die Auflagefläche der Massen (z.B. Unterarm). Es bewirkt kleinste Schwerpunktverlagerung bei zu pflegenden Menschen und führt damit zur Druckentlastung. Angewendet ahmt das Rhomb-med® Rhombi-Kissen die natürliche Mikrobewegungen des Körpers nach und fördert auf diese Weise die Eigenbewegung und Körperwahrnehmung. Das Rhomb-med® Rhombi-Kissen ist kochwaschbar.

ANWENDUNGEN Beispiele

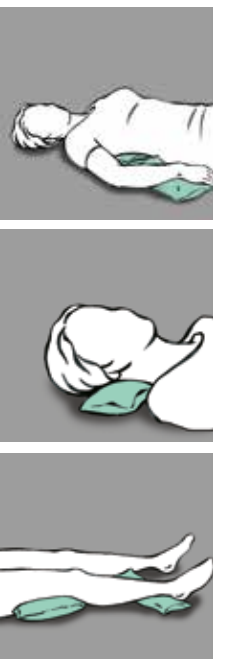

Bezug			Verarbeitung		
Robuster Oberstoff in Körperbindung 50 % Baumwolle und 50 % Polyester			Sicherheitsnähte rautenförmig		
Füllung			Original Rhomb-fill®		
Größe in cm	Art.Nr. Kissen	Hilfsmittelnr.	Passende Schutzbezüge zum Kissen inkl. Hotelverschluss *Detailbeschreibungen siehe Seite 54		
			Schutzbezug Baumwolle	PU-Schutzbezug Semy	Schutzbezug Climate Soft®
15 x 30	46.900	11.11.05.1012	51.901	59.901	50.901

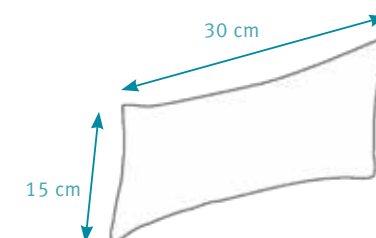

Die unterstützende
Rhombomed®
Armrampe

Die Ruhe, die beweglich hält.®
RHOMBO MEDICAL

- Hochlagerung des Arms
- Ruhigstellung des Arms




Die Rhombomed® Armrampe dient zur ruhigstellenden Positionierung des gesamten Armes in der großen Ausführung oder des Unterarmes in der kleineren Variante. Das Füllmaterial Rhombomed® sorgt dabei für die notwendige Stabilisierung bei gleichzeitiger Druckentlastung. Die Rhombomed® Armrampe ist kochwaschbar.

ANWENDUNGEN
Beispiele



Bezug	Robuster Oberstoff in Körperbindung 50 % Baumwolle und 50 % Polyester	Verarbeitung	Sicherheitsnähte mit keilförmigem Seitenböden		
Füllung	Original Rhombo-med®				
Größe in cm	Art.Nr. Kissen	Passende Schutzbezüge zum Kissen inkl. Hotelverschluss <i>*Detailbeschreibungen siehe Seite 54</i>			
		Schutzbezug Baumwolle	PU-Schutzbezug Semy	Schutzbezug Climate Soft®	
35 x 20 x 12	40.707	51.007	59.007	50.007	
80 x 25 x 25	40.744	51.044	59.044	50.044	

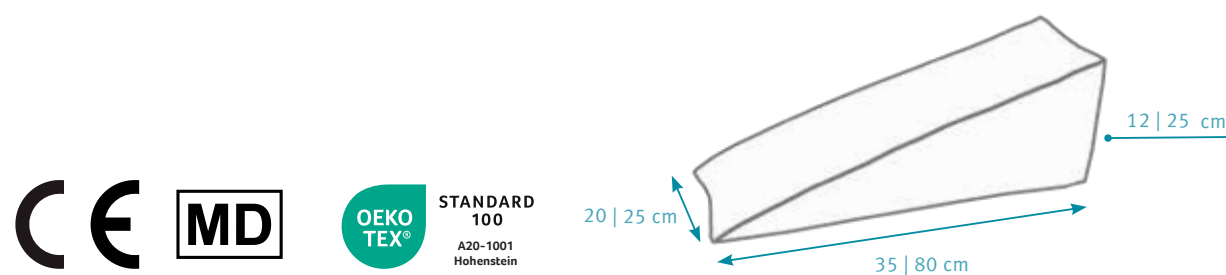

Die sichernde
Rhombomed®
Unterschenkelmanschette

Die Ruhe, die beweglich hält.®
RHOMBO MEDICAL

- Besondere Freilagerung der Ferse durch Fixiermöglichkeit
- Reduzierung starker Bewegungen




Die Unterschenkel-Manschette dient zur Freilagerung der Ferse. Die weich gepolsterte Befestigungsmanschette umschließt sanft das Schienbein. Der Unterschenkel wird druckentlastend positioniert und sicher mit Hilfe von Klettverschlüssen fixiert, so dass die Ferse angenehm freigelagert ist. Die Rhombomed® Unterschenkel-Manschette ist kochwaschbar.

ANWENDUNGEN
Beispiele



Bezug	Robuster Oberstoff in Körperbindung 50 % Baumwolle und 50 % Polyester	Verarbeitung	Sicherheitsnähte Manschette mit Klettverschlüssen
Füllung	Original Rhombomed®		
Größe in cm	Art.Nr. Kissen	Konstruktionsbedingt ist für dieses Kissen kein Schutzbezug lieferbar.	
55 x 20 x 8	30.328		

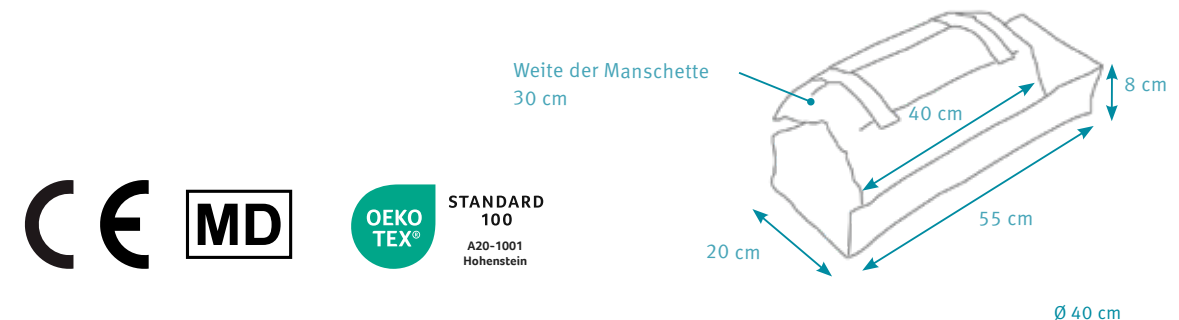

Das entlastende Rhombomed® Venenkissen

Die Ruhe, die beweglich hält.®
RHOMBO
MEDICAL

- Optimale Beinhochlagerung
- Entlastung der Wirbelsäule
- Entspannung
- Schmiegt sich angenehm an Beinform an




Das keilförmige Rhombomed® Venenkissen unterstützt die therapeutische Hochlagerung der Beine bei venös bedingten Beschwerden und kann ebenso zur Entlastung der Wirbelsäule eingesetzt werden. Der Schaumkern des Venenkissens ist für die Beinauflage vorgeformt und sanft ansteigend. Der Clou: Die Auflagefläche der Beine ist auf der Innenseiten des Kissenbezuges mit Rhombomed® Füllung gepolstert, so dass sich das Kissen lückenlos an jede Beinform anpasst, für optimale Druckverteilung sorgt und den venösen Blutfluss sehr gut unterstützt. Der Kissenbezug ist abnehmbar und kochwaschbar.

ANWENDUNGEN Beispiele



Bezug	100 % Polyester - Velours	Verarbeitung	Schaumkern der mit Rhombomed® Polsterung im Bezug versehen ist	
Füllung	Original Rhombomed®			

Größe in cm	Art.Nr. Kissen	Passende Schutzbezüge zum Kissen inkl. Reißverschluss *Detailbeschreibungen siehe Seite 54		
		Schutzbezug Baumwolle	PU-Schutzbezug Semy	Schutzbezug Climate Soft®
69 x 63 x 20	44.140	--	59.050	50.050

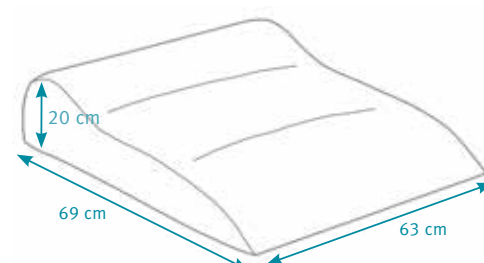

Das variable Rhombomed® Stufenbettkissen

Die Ruhe, die beweglich hält.®
RHOMBO
MEDICAL

- Zum druckentlastenden Hochlagern der Beine z. B. bei Schwellungen
- Zur Entlastung von Bauch und Rücken
- Variabel an verschiedene Beinlängen anpassbar
- Schmiegt sich angenehm an Beinform an




Das Rhombomed® Stufenbettkissen dient zum komfortablen Hochlagern der Beine in der Stufenbettlage. Die Wirbelsäule wird entlastet, die Bandscheiben können sich optimal regenerieren. Diese Liegeposition fördert auch den venösen Blutfluss bei geschwollenen Beinen und kann ebenso entlastend bei Bauchschmerzen wirken. Durch einfaches Drehen kann das Kissen an unterschiedliche Beinlängen angepasst werden.

ANWENDUNGEN Beispiele



Bezug	100 % Polyester	Verarbeitung	Sicherheitsnähte
Füllung	Original Rhombomed®		Würfel mit zwei verschiedenen Seitenlängen

Größe in cm	Art.Nr. Kissen	Für dieses Kissen sind keine Schutzbezüge lieferbar.
50 x 50 x 38	43.424	

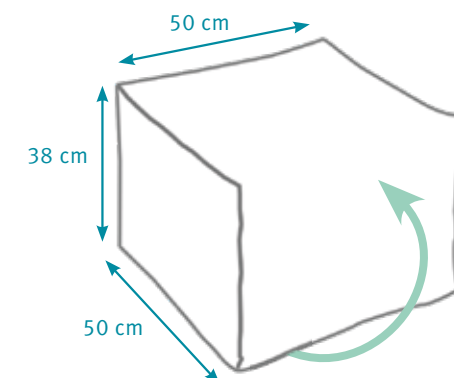

Das sensorische
Rhombomedical®
Bobath-Kissenset

Die Ruhe, die beweglich hält.® **RHOMBO MEDICAL**

- Lagerung nach Bobath
- Sensorische Stimulation
- Förderung der Körperwahrnehmung



Das Bobath-Kissenset besteht aus sechs verschiedenen Kissen, die für den rehabilitativen Pflegeeinsatz nach Bobath ausgewählt wurden. Die Bobath-Lagerung zählt zu den Pflege- und Therapiekonzepten für Patienten mit Lähmungen, Störungen des Muskeltonus verursacht durch z. B. Schlaganfall, Hirnbluten oder andere Krankheiten des Zentralen-Nervensystems. Ziel ist es, den Patienten die von der Lähmung betroffene Körperseite bewusst zu machen, die Bewegungsfähigkeiten des Patienten zu aktivieren sowie z. B. einem Dekubitus und Kontrakturen vorzubeugen. Alle Kissen des Sets sind kochwaschbar.

ANWENDUNGEN
Beispiele



Bezug		Robuster Oberstoff in Körperbindung 50 % Baumwolle und 50 % Polyester	Verarbeitung			siehe Beschreibungen der Einzelkissen
Füllung		Original Rhombo-fill® u. Rhombo-med®				
Größe in cm	Art.Nr. Kissen		Passende Schutzbezüge zum Set inkl. Hotelverschluss <i>*Detailbeschreibungen siehe Seite 54</i>			
			Schutzbezug Baumwolle	PU-Schutzbezug Semy	Schutzbezug Climate Soft®	
	99.011	Set bestehend aus:	95.111	95.911	95.011	



Das

vielfältige

Rhombomedical®

Grundlagerungs-Set

Die Ruhe, die beweglich hält.®

RHOMBO MEDICAL

■ Vielfältige prophylaktische und therapeutische Positionierungsmöglichkeiten



Das Grundlagerungs-Set ist die optimale Grundausstattung für die Pflege, da mit den einzelnen Kissen des Sets oder deren Kombination nahezu alle prophylaktischen und therapeutischen Lagerungen möglich sind. Frei- und Umlagern zur Dekubitusprophylaxe sind damit professionell möglich, wie auch das Vorbeugen von Kontrakturen. Alle Kissen des Sets sind komplett kochwaschbar.

ANWENDUNGEN

Beispiele



Bezug		Robuster Oberstoff in Körperbindung 50 % Baumwolle und 50 % Polyester	Verarbeitung		siehe Beschreibungen der Einzelkissen
Füllung		Original Rhombo-fill® u. Rhombo-med®			
Größe in cm	Art.Nr. Kissen		Passende Schutzbezüge zum Set inkl. Hotelverschluss *Detailbeschreibungen siehe Seite 54		
			Schutzbezug Baumwolle	PU-Schutzbezug Semy	Schutzbezug Climate Soft®
	99.005	Set bestehend aus:	95.105	95.905	95.005
60 x 75	33.132	RF® Komfortkissen			
45 x 80	32.823	RF® Universalkissen			
75 x 75	43.077	RM® Multikissen			



Das

druckentlastende

Rhombomedical®

Kissenbett-Set

Die Ruhe, die beweglich hält.®

RHOMBO MEDICAL

■ Weichlagerung und partielle Freilagerung

■ Vielfältige Kombinationsmöglichkeiten

■ Druckentlastend z.B. bei Schmerzpatienten, Terminalpflege, Osteoporose



Dieses Lagerungsset besteht aus 6 Rhombo-fill® Universalkissen, aus denen ein Kissenbett zur Weichlagerung und partiellen Freilagerung gelegt werden kann. Druckgefährdete Körperbereiche wie beispielsweise die Wirbelsäule, der Steiß und die Fersen können mit dem Set frei gelagert werden. Alle Kissen des Sets sind komplett kochwaschbar.

ANWENDUNGEN

Beispiele



Bezug		Robuster Oberstoff in Körperbindung 50 % Baumwolle und 50 % Polyester	Verarbeitung		siehe Beschreibungen der Einzelkissen
Füllung		Original Rhombo-fill® u. Rhombo-med®			
Größe in cm	Art.Nr. Kissen		Passende Schutzbezüge zum Set inkl. Hotelverschluss *Detailbeschreibungen siehe Seite 54		
			Schutzbezug Baumwolle	PU-Schutzbezug Semy	Schutzbezug Climate Soft®
	99.002	Set bestehend aus:	95.102	95.902	95.002
45 x 80	32.823	6 x RF® Universal- kissen			



Das fünfteilige
Rhombomedical®
Kinästhetik-Set I

Die Ruhe, die beweglich hält.®
RHOMBO MEDICAL

■ Zur kinästhetischen Lagerung / Positionierung
■ Zur Basalen Stimulation
■ Zur Mikrolagerung



Das Kinästhetik-Kissenset I ist die ideale Ausstattung zur Lagerung nach den Konzepten der Kinästhetik, der Basalen Stimulation und kann auch im Rahmen der Mikrolagerung eingesetzt werden. Es besteht aus der vielseitig einsetzbaren Rhomo-med Rolle zur Positionsunterstützung in 20x220cm, zwei Halbrollen und zwei Keilen für die Mikrolagerung nach Klein. Alle Kissen des Sets sind kochwaschbar.

ANWENDUNGEN
Beispiele



Bezug		Robuster Oberstoff in Körperbindung 50 % Baumwolle und 50 % Polyester		Verarbeitung		siehe Beschreibungen der Einzelkissen	
Füllung		Original Rhombo-med®					
Größe in cm	Art.Nr. Kissen		Passende Schutzbezüge zum Set inkl. Hotelverschluss <i>*Detailbeschreibungen siehe Seite 54</i>				
			Schutzbezug Baumwolle	PU-Schutzbezug Semy	Schutzbezug Climate Soft®		
	99.017	Set bestehend aus:	95.117	95.917	95.017		
Ø 20 x 220	46.200	RM® Kinästhetik-Rolle					
25 x 9 x 4,5	46.300	2 x Halbrollen					
25 x 20 x 20	46.400	2 x Keile					



Das fünfteilige
Rhombomedical®
Kinästhetik-Set II

Die Ruhe, die beweglich hält.®
RHOMBO MEDICAL

■ Zur Ruhigstellung von Kopf und Nacken
■ Zur Freilagerung von Kopf und Nacken



Das Kinästhetik-Kissenset II ist die ideale Ausstattung zur Lagerung nach den Konzepten der Kinästhetik, der Basalen Stimulation und kann auch im Rahmen der Mikrolagerung eingesetzt werden. Es besteht aus der vielseitig einsetzbaren Rhomo-med Rolle zur Positionsunterstützung in 20x100cm, zwei Halbrollen und zwei Keilen für die Mikrolagerung nach Klein. Alle Kissen des Sets sind kochwaschbar.

ANWENDUNGEN
Beispiele



Bezug		Robuster Oberstoff in Körperbindung 50 % Baumwolle und 50 % Polyester		Verarbeitung		siehe Beschreibungen der Einzelkissen	
Füllung		Original Rhombo-med®					
Größe in cm	Art.Nr. Kissen		Passende Schutzbezüge zum Set inkl. Hotelverschluss <i>*Detailbeschreibungen siehe Seite 54</i>				
			Schutzbezug Baumwolle	PU-Schutzbezug Semy	Schutzbezug Climate Soft®		
	99.027	Set bestehend aus:	95.127	95.927	95.027		
Ø 20 x100	46.100	RM® Kinästhetik-Rolle					
25 x 9 x 4,5	46.300	2 x Halbrollen					
25 x20 x20	46.400	2 x Keile					



Das atemunterstützende Rhombomedical® AVT-Prophylaxe-Set

- Weichlagerung und partielle Freilagerung
- Vielfältige Kombinationsmöglichkeiten
- Fördert die Körperwahrnehmung



Das AVT-Prophylaxe-Set besteht aus zwei Rhombo-med® Lagerungskissen, die – zeitlich begrenzt – in A-, V- oder T-Form unter den Oberkörper platziert werden mit dem Ziel, eine bessere Belüftung von pneumoniegefährdeten Lungenbereichen zu erreichen. Durch die eingesetzte Rhombo-med® Füllung wird eine höhere Stabilität und somit der Effekt der Dehnung erreicht. Alle Kissen des Sets sind kochwaschbar.

ANWENDUNGEN Beispiele



Bezug		Robuster Oberstoff in Körperbindung 50 % Baumwolle und 50 % Polyester		Verarbeitung		siehe Beschreibungen der Einzelkissen	
Füllung		Original Rhombo-med®					
Größe in cm	Art.Nr. Kissen		Passende Schutzbezüge zum Set inkl. Hotelverschluss <i>*Detailbeschreibungen siehe Seite 54</i>				
			Schutzbezug Baumwolle	PU-Schutzbezug Semy	Schutzbezug Climate Soft®		
	99.004	Set bestehend aus:	95.104	95.904	95.004		
25 x 80	40.205	2 x RM® Lagerungs- kissen					




Das sanfte Rhombomedical® Atemunterstützende-Set

- Zur Ruhigstellung von Kopf und Nacken
- Zur Freilagerung von Kopf und Nacken



Das Atemunterstützende-Set besteht aus zwei Rhombo-fill® Universalkissen und unterstützt die Atemhilfsmuskulatur z. B. bei chronischen Lungenerkrankungen. Ebenso eignet sich das Set zur Druckentlastung der Schultern. Alle Kissen des Sets sind kochwaschbar.

ANWENDUNGEN Beispiele

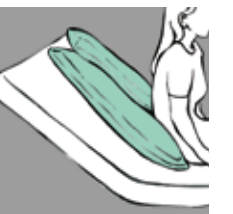

Bezug		Robuster Oberstoff in Körperbindung 50 % Baumwolle und 50 % Polyester		Verarbeitung		siehe Beschreibungen der Einzelkissen	
Füllung		Original Rhombo-fill®					
Größe in cm	Art.Nr. Kissen		Passende Schutzbezüge zum Set inkl. Hotelverschluss <i>*Detailbeschreibungen siehe Seite 54</i>				
			Schutzbezug Baumwolle	PU-Schutzbezug Semy	Schutzbezug Climate Soft		
	99.008	Set bestehend aus:	95.108	95.908	95.008		
25 x 80	32.805	2 x RF® Universal- kissen					



Das flexible
Rhombomedical®
Sensorrollen-Set

- Zur Basalen Stimulation
- Zur Förderung der Körperwahrnehmung
- Zur stützenden und stabilisierenden Positionierung



Die beiden Sensorrollen als Set werden in Rückenlage seitlich neben dem Körper anmodelliert. Dadurch erhält der zu Pflegendende eine Möglichkeit, seine Körpergrenzen zu spüren und sich dadurch wahrzunehmen. Alle Kissen des Sets sind komplett kochwaschbar.

ANWENDUNGEN
Beispiele



Bezug		Robuster Oberstoff in Körperbindung 50 % Baumwolle und 50 % Polyester		Verarbeitung		siehe Beschreibungen der Einzelkissen	
Füllung		Original Rhombo-med®					
Größe in cm	Art.Nr. Kissen			Passende Schutzbezüge zum Set inkl. Reißverschluss <i>*Detailbeschreibungen siehe Seite 54</i>			
				Schutzbezug Baumwolle	PU-Schutzbezug Semy	Schutzbezug Climate Soft®	
	99.009	Set bestehend aus:		95.109	95.909	95.009	
Ø 12 x250	46.600	2 x RM® Sensorrollen					



Der

komfortable

Rhombο-fill® Anti-Dekubitus- und Weichlagerungsüberzug

Die Ruhe, die beweglich hält.®

RHOMBO MEDICAL

Zur Weichlagerung

Bei druckschmerzempfindlichen zu Pflegenden



Der Rhombo-fill® Weichlagerungsüberzug ist 5 cm stark und verbessert den Liegekomfort insbesondere bei schmerzempfindlichen zu Pflegenden aufgrund z. B. von Rheuma oder Osteoporose. Zusätzlich sorgt die Auflage für ein gesundes trockenes Bettklima ohne Kältebrücken. Die Auflage ist an Kopf- und Fußende mit Einschubtaschen versehen, in die Matratzen bis zu einer maximalen Höhe von ca. 20 cm eingeschoben werden und damit die Auflage auf der Matratze sichern. Zusätzlich steht auch ein Weichlagerungsbetteinlage als kleine Lösung zur Verfügung. Die komplette Auflage ist kochwaschbar.

Bezug	Robuster Oberstoff in Körperbindung 50 % Baumwolle und 50 % Polyester		Verarbeitung	Sicherheitsnähte gekammert; Einschubtaschen an Kopf- und Fußende für die Matratze
Füllung	Original Rhombo-fill®			
Größe in cm	Art.Nr. Kissen		<i>Konstruktionsbedingt sind für diese Kissen keine Schutzbezüge lieferbar.</i>	
90 x 200 x 5	33.948	Weichlagerungs- überzug		
100 x 200 x 5	33.951	Weichlagerungs- überzug		
80 x 90 x 5	34.046	Betteinlage		
75 x 140 x 5	34.043	Betteinlage		



Die Ruhe, die beweglich hält.®

RHOMBO MEDICAL

RHOMBO-FILL® WEICHLAGERUNG

Details



Weichlagerungsbetteinlage 75x140x5cm



Kammern der Betteinlage

Kammern des Weichlagerungsüberzuges

Einschubtasche an Kopf- und Fußende sichert den Weichlagerungsüberzug auf der Matratze

Das weiche
Rhombio-therm®
Soft Sitzkissen

Die Ruhe, die beweglich hält.® **RHOMBO MEDICAL**

- Erleichtert das Aufstehen aus der Sitzposition
- Gesichertes Sitzen dank Antirutsch-Unterseite
- Erhöhte Sitzposition
- Hervorragende Druckentlastung



Das Rhombio-therm® Soft Sitzkissen ist ein sehr komfortables Sitzkissen mit einem Zweikomponenten-Schaumstoffkern. Das Kissen nimmt die Körperkontur spürbar sanft und punktelastisch auf und garantiert dadurch ein weiches, druckentlastendes Einsinken. Die angenehme Sitzhöhe von 10 cm erleichtert das Aufstehen. Zugleich ist durch das patentierte Verfahren der Schnitttechnik der Rhombio-therm®-Auflage eine gleichmäßig gute Belüftung gegeben. Zwei Schaumkern-Varianten mit unterschiedlich fester Visko-Auflage, bei gleichbleibender Basis stehen zur Auswahl für unterschiedlich empfohlene Nutzergewichte. Der Bezug ist aus samtweichem Mikroplüsch gefertigt, abnehmbar und waschbar.

Bezug	Velours - 100 % Polyester	Verarbeitung	Unterseite mit Antirutsch-Beschichtung Spezielle Rhombio-therm® Stanzung auf der Oberseite
Füllung	Zweikomponenten-Schaumkern mit viskoelastischer Oberschicht		
Größe in cm	Art.Nr. Kissen	Passende Schutzbezüge zum Kissen inkl. Reißverschluss *Detailbeschreibungen siehe Seite 54	
43 x 43 x 10	34.442	Soft Sitzkissen bis 80 kg	PU-Schutzbezug Semy 59.422
43 x 43 x 10	34.722	Soft Sitzkissen ab 80 kg	59.422



Die Ruhe, die beweglich hält.® **RHOMBO MEDICAL**

RHOMBO-THERM® SOFT SITZKISSEN

Details



Unterseite mit Antirutschbeschichtung



Kernaufbau bis 80 kg:
Abbildung Art. Nr. 34.442 mit sehr softer viskoelastischer Auflage für ein niedrigeres Nutzergewicht



Kernaufbau ab 80 kg:
Abbildung Art. Nr. 34.722 mit festerer viskoelastischer Auflage für ein höheres Nutzergewicht

Die strapazierfähigen
Rhombio-fill®
Kopfkissen

Die Ruhe, die beweglich hält.®
**R H O M B O
M E D I C A L**

- Ideale Kissen für die Pflege
- Langlebig und strapazierfähig
- Leicht aufzuschütteln/klopfen
- Gutes Mikroklima
- Stützwirkung bleibt dauerhaft erhalten



Rhombio-fill® Kopfkissen ermöglichen ein sanftes Einsinken und bieten gleichzeitig eine gute Unterstützung. Sie lassen sich leicht aufschütteln und erfüllen aufgrund der hochwertigen und strapazierfähigen Rhombio-fill® Füllung höchste Hygienestandards. Rhombio-fill® Markenqualität überzeugt Kenner seit Jahrzehnten durch die besondere Langlebigkeit der Produkte. Rhombio-fill® Kopfkissen sind in vielen Größen erhältlich und auch als schwerentflammare Variante lieferbar. Das Rhombio-fill® Kopfkissen ist kochwaschbar.

Option Standard			Option schwer entflammbar	
Bezug Robuster Oberstoff in Körperbindung 50 % Baumwolle und 50 % Polyester			Bezug Trevira CS schwer entflammbar	
Füllung Original Rhombio-fill®			Füllung Original Rhombio-fill®	
Verarbeitung Sicherheitsnähte			Verarbeitung Sicherheitsnähte	
Größe in cm	Art.Nr. Kissen Option Standard	Art.Nr. Kissen Option schwer entflammbar	Passende Schutzbezüge zum Kissen inkl. Hotelverschluss *Detailbeschreibungen siehe Seite 54	
			PU-Schutzbezug Semy	Schutzbezug Climate Soft®
35 x 40	21.109	23.209	59.109	50.109
40 x 40	21.114	23.214	59.114	50.114
40 x 80	21.119	23.219	59.119	50.123
60 x 80	21.134	23.234	59.134	50.134
80 x 80	21.145	23.245	59.145	50.145



BEZÜGE
wahlweise



Bild oben: PU-Schutzbezug Semy

Bild unten: PU-Schutzbezug Climate Soft®

Das 6-Kammer-System
Rhombio-fill®
Nackenstützkissen

Die Ruhe, die beweglich hält.®
**R H O M B O
M E D I C A L**


- Weich- bzw. lokale Freilagerung
- Druckentlastung im Gesäßbereich
- in zwei Varianten erhältlich



Das Rhombio-fill® Nackenstützkissen besteht aus einem 6-Kammer-System. Diese unterschiedlich großen 6 Kammern sind mit Rhombio-fill® gefüllt. Die Füllmengen der einzelnen Kammern variieren und sind abgestimmt auf die Anforderung der jeweiligen Liegeposition des Nackens bzw. Kopfes. Die mittleren Kammern sind abgestimmt auf die Unterstützung des Kopfes und Nackens in Rückenlage. Die beiden jeweils äußeren Kammern unterstützen perfekt in Seitenlage. Das Rhombio-fill® Nackenstützkissen sorgt für Entspannung und überzeugt durch seine Langlebigkeit. Das Rhombio-fill® Nackenstützkissen ist kochwaschbar.

Bezug	Robuster Oberstoff in Körperbindung 50 % Baumwolle und 50 % Polyester	Verarbeitung	Sicherheitsnähte gekammert		
Füllung	Original Rhombo-fill®				
Größe in cm		Art.Nr. Kissen	Passende Schutzbezüge zum Kissen inkl. Reißverschluss <i>*Detailbeschreibungen siehe Seite 54</i>		
			Schutzbezug Baumwolle	PU-Schutzbezug Semy	Schutzbezug Climate Soft®
40 x 80		21.323	51.123	59.123	50.123

Schema des 6-Kammer-Systems

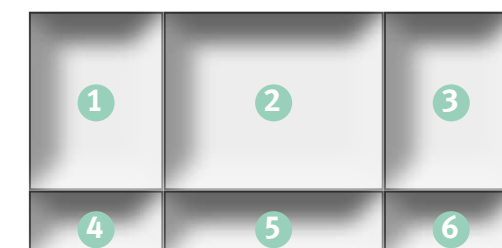

BEZÜGE
wahlweise

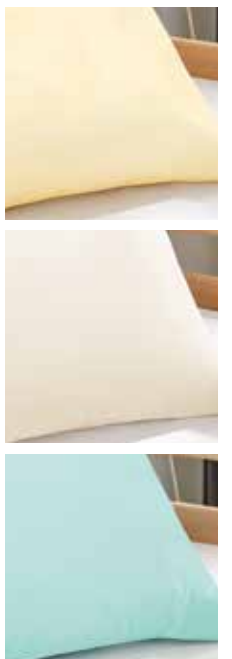


Bild oben: Schutzbezug Baumwolle
Bild mitte: PU-Schutzbezug Semy
Bild unten: PU-Schutzbezug Climate Soft®



Die beruhigende
Rhombomedical®
IM-Pression-Decke

Die Ruhe, die beweglich hält.®
**RHOMBO
MEDICAL**

- Optimal für den Pflegeeinsatz
- Gutes Mikroklima
- Angenehm weicher Veloursbezug
- Gesamtgewicht: 4,9 kg



Die IM-Pression Decke übt aufgrund ihrer kleinen integrierten Gewichte einen sanften, gleichmäßigen Druck auf den Körper aus. Damit werden die tiefen Sensoren angeregt und eine beruhigende Wirkung hervorgerufen. Die Decke fördert die Körperwahrnehmung und vermittelt auf diese Weise ein Gefühl der Geborgenheit. Eine Eingewöhnungszeit ist empfehlenswert. Die Anwendung sollte zu Beginn nicht länger als 10 bis 15 Minuten dauern und langsam schrittweise gesteigert werden.

Die IM-Pression Decke ist als Tages- und als Nachtdecke einsetzbar.

Bezug	100 % Polyester - Velours	Füllung	100% Polyester Vlies mit Mikroglasperlen		
Farbe	türkis	Verarbeitung	Muschelsteppung mit integrierten Gewichten aus Mikroglasperlen		
Größe in cm		Art.Nr. Kissen	Passende Schutzbezüge für Decke inkl. Reißverschluss <i>*Detailbeschreibungen siehe Seite 54</i>		
			Schutzbezug Baumwolle	PU-Schutzbezug Semy	Schutzbezug Climate Soft®
135 x 200		77.153	51.453	59.453	50.453

INFOS Details



Bild oben:
Mit Mikroglasperlen gefüllte Taschen sind im Vlies eingearbeitet

Bild unten:
Mikroglasperlen sorgen für sanften Druck auf den Körper



Die Ruhe, die beweglich hält.®
**RHOMBO
MEDICAL**

Anwendungsbeobachtung der IM-Pression Decke

1 Hintergrund

Demenz ist eine Diagnose, die in Deutschland immer häufiger gestellt wird. Das hat unter anderem mit der demografischen Entwicklung unserer Gesellschaft zu tun, die zunehmend ein höheres Lebensalter erreicht. Zu den Symptomen demenzieller Erkrankungen zählen Störungen des Kurzzeitgedächtnisses und der Orientierung. Ein weiteres häufig auftretendes Problem stellen die Schlafstörungen dar, die einerseits mit einem zunehmenden Lebensalter auftreten, aber auch in Zusammenhang mit der Krankheit Demenz stehen. Laut validen Studien leiden schätzungsweise zwischen 25% und 50% der älteren, alten und hochaltrigen Menschen, die an einer Form der Demenz erkrankt sind unter Schlafstörungen.¹ Diese äußern sich in einer Umkehr des Tages- und Nachtrhythmus, in häufigem nächtlichen Erwachen, im Wandering (zielloses Umherlaufen), sowie in zunehmendem Schlaf zur Tageszeit.²

2 Fragestellung

Der Problematik der Schlafstörungen bei demenziell erkrankten Menschen könnte neben bereits bestehenden Interventionsmöglichkeiten (Erhöhung der Tagesaktivität, Lichttherapie, Beschäftigungstherapie), durch die IM-Pression Decke der Firma Lück ein neuer Lösungsansatz entgegengebracht werden.

Aufgrund fehlender Evidenz im Bereich der Wahrnehmungsförderung demenziell Erkrankter, wurde diesem Projekt folgende Fragestellung zugrunde gelegt: „Dient die RHOMBO-MEDICAL IM-Pression Decke der Firma Lück, der Verbesserung der Schlafqualität von demenziell erkrankten Menschen?“

3 Methode

Es handelt sich bei dieser Studie um eine Anwendungsbeobachtung in Form einer Post Marketing Surveillance Studie (PMS). Bei diesen Untersuchungen soll die Wirksamkeit eines Produktes unter Alltagsbedingungen erforscht werden³.

Methodisches Vorgehen und Studienstruktur:

- Entwurf eines Beobachtungsbogens
- Einschlusskriterien: Demenz, Wandering, nächtliche Unruhe, Ein- und Durchschlafstörung, schriftliche Einverständniserklärung
- Ausschlusskriterien: Atemwegserkrankungen (z. B. COPD, Asthma)
- Stichprobe: n = 6 (+2 studienübergreifende Probanden), weiblich
- Erster Beobachtungsdurchlauf 09.11.2011 – 19.11.2011
- Zweiter Beobachtungsdurchlauf 28.11.2011 – 02.12.2011
- Auswertung mit Hilfe von Excel ®




4 Die IM-Pression Decke




- Hersteller: Firma Lück
- Material: weiches Velours
- Maße: 135 x 200 cm
- Gewicht: 4800 g
- Füllmaterial: Mikroglasperlen und Vlies

5 Ergebnisse

Um den Verlauf des Schlafes der einzelnen Probanden vergleichen zu können, wurde der Mittelwert der Schlafqualitäten zu den Beobachtungszeitpunkten und -tagen berechnet.

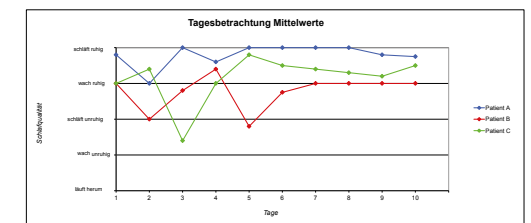

In dem oberen Diagramm ist zu sehen, dass sich die Schlafqualität in der Tagesbeobachtung ab dem 6. Tag stabilisiert und sich im positiven Qualitätsbereich ansiedelt. Daraus kann geschlossen werden, dass sich nach einer Eingewöhnungsphase mit der IM-Pression Decke, die Schlafqualität der Probanden stabilisiert.

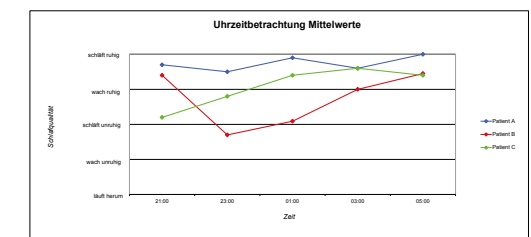

Aus dem Uhrzeitdiagramm wird ersichtlich, dass die Probanden ab etwa 1:00 Uhr nachts kaum Unruhe zeigen und ruhig schlafen. Im Vergleich zu den Dokumentationen des Pflegeheimes vorab, lässt sich schließen, dass die nächtliche Unruhe der Probanden durch die IM-Pression Decke reduziert werden konnte.

In einer Studie konnte die beruhigende und entspannende Wirkung der Decke nachgewiesen werden. Die Tiefensensibilität wird dabei angeregt.

Positive Ergebnisse mit der RHOMBO-MEDICAL IM-Pression-Decke wurden auch bei Anorexia nervosa und Wachkoma beobachtet.

Die IM-Pression-Decke ist vielseitig einzusetzen und kann sowohl am Tag als auch in der Nacht kurz- und längerfristig eingesetzt werden. Sie ist bei 60°C waschbar und kann bei niedriger Temperatur getrocknet werden.



RHOMBO-MEDICAL® Schutzbezug abwaschbar

Die angebotenen, abwaschbaren Schutzbezüge sind hochwertige, elastische Hygienebezüge und bestehen aus einem polyurethankaschtierten Jersey. Die mikrofeine, atmungsaktive Beschichtung garantiert ein angenehmes Klima.

Material: 100% Polyester mit PU-Beschichtung | Farbe: creme-weiß

- Atmungsaktiv
- Klimaregulierend
- Elastisch
- Wasserdicht
- Bakterien- und virendicht
- Desinfizierbar/Wischdesinfektion
- PVC-frei
- Kochwaschbar
- Trocknergeeignet
- Schwer entflammbar



RHOMBO-MEDICAL® Baumwollschutzbezug

Die angebotenen Baumwollschutzbezüge bestehen aus einem sehr glatten, hochwertigen Mako-Jersey und sind besonders weich, anschmiegsam und hautsympathisch.

Material: 100% Baumwolle | Farbe: creme

- Weich und anschmiegsam
- Hautsympathisch
- Kochwaschbar
- Trocknergeeignet



RHOMBO-MEDICAL® Schutzbezug CLIMATE SOFT®

Die angebotenen Hygienebezüge sind wasserdicht, atmungsaktiv und verfügen dennoch über einen angenehmen, sehr textilen Charakter.

Material: 100% Polyester Strickware, laminiert mit 100% PU-Membrane | Farbe: türkis

- Atmungsaktiv
- Klimaregulierend
- Super elastisch
- Wasserdicht
- Hoch wasserdampfdurchlässig
- PVC-frei
- Kochwaschbar
- Trocknergeeignet

BEZÜGE ÜBERSICHT DER VERSCHLUSSVARIANTEN

BEZÜGE MIT REISSVERSCHLUSS

Viele RHOMBO-MEDICAL® Bezüge werden mit einem praktischen Reißverschluss geliefert. Für eine sichere Nutzung sind die Reißverschlüsse verdeckt und bewusst ohne Zipper gearbeitet.



BEZÜGE MIT HOTELVERSCHLUSS

Ein Großteil der RHOMBO-MEDICAL® Bezüge werden mit einem sogenannten Hotelverschluss geliefert. Dabei handelt es sich um eine Verschlussform für Kissen und Bettdecken, die ohne Knöpfe und Reißverschlüsse auskommt. Bei Bezügen mit Hotelverschluss werden Kissen bzw. Bettwaren durch eine nach innen eingeschlagene und vernähte Tasche im Bezug gesichert.



BEZÜGE MIT KORDELVERSCHLUSS

Die Baumwoll-Bezüge der Sensorolle werden einem sogenannten Kordelverschluss geliefert. An beiden Ende des Bezuges sind zu diesem Zweck ein Zugband eingearbeitet.

Ohne Abbildung

Ausblick: Weitere Sortimente Matratzen & Auflagen

RHOMBO-MEDICAL® bietet professionelle
Produkte zur Dekubitusintervention

**R H O M B O
M E D I C A L**

Die Ruhe, die beweglich hält.®

Ideal im
Pflegealltag

Dekubitusintervention
Dekubitusprophylaxe
Dekubitustherapie



Matratzen für Pflegebetten

RHOMBO-MEDICAL® bietet professionelle Pflegebettmatratzen, Spezialmatratzen und Auflagen für den medizinischen und therapeutischen Bereich, die in Krankenhäusern, Kliniken, Rehabilitationseinrichtungen, Altenpflegeheimen und sonstigen therapeutischen Einrichtungen zum Einsatz kommen. Ihre Herstellung basiert fast immer auf eigenen patentierten Verfahren der Schaumverarbeitung, die Komfort und Langlebigkeit der Matratzen sicherstellen.

RHOMBO-MEDICAL® bietet zahlreiche Matratzen und Auflagen zur Dekubitusintervention. Das Angebot reicht von soliden Pflegebettmatratzen mit hohen Komforteigenschaften, über Matratzen für Schwergewichtige bis hin zu Weichlagerungs- bzw. Anti-Dekubitusmatratzen.



Mehr erfahren unter:
www.rhomb-medical.de

Unser Engagement Qualitäts- und Umweltmanagement



**R H O M B O
M E D I C A L**

Die Ruhe, die beweglich hält.®

QM/UM System Zertifizierungen

Wir übernehmen Verantwortung

Ein bewusster und umweltschonender Umgang mit Ressourcen war schon immer ein wichtiges Thema für die Lück GmbH & Co. KG als Hersteller von RHOMBO-MEDICAL® Produkten. Die Weichen dafür wurden bereits Anfang der 1990er Jahre gestellt, als das Unternehmen Lück als eines der ersten Unternehmen der Branche ein zertifiziertes Qualitäts- und Umweltmanagement einführte.

Lück ist seitdem Qualitäts- und Umweltmanagement zertifiziert nach DIN EN ISO 9001 sowie DIN ISO 14001 und beweist damit sein aktives Engagement für Umwelt und Natur.



Qualitätsmanagement – DIN ISO 9001

Die DIN EN ISO 9001 ist eine Norm aus der Gesamtreihe DIN EN ISO 9000 ff. Sie ist ein weltweit anerkannter Standard, der Anforderungen an ein wirksames Qualitätsmanagement in einem Unternehmen definiert.

Umweltmanagement – DIN ISO 14001

Die ISO 14001 gilt als international anerkannte Norm für Umwelt-Managementsysteme. Um Unternehmen die Anwendung eines weltweit einheitlichen Standards zu ermöglichen, wurde die ISO 14001 geschaffen. Ziel der DIN ISO 14001 ist es, den Umweltschutz im Betrieb auf einem umweltverträglichen Stand zu halten und kontinuierlich zu steigern.

Die Ruhe, die beweglich hält.®

R H O M B O
M E D I C A L



Florence Nightingale

Pflege ist eine Kunst

"Pflege ist eine Kunst und fordert, wenn sie Kunst werden soll, eine ebenso große Hingabe, eine ebenso große Vorbereitung, wie das Werk eines Malers oder Bildhauers. Denn was bedeutet die Arbeit an toter Leinwand oder kaltem Marmor im Vergleich zu der am lebendigen Körper, dem Tempel für den Geist Gottes?"

*Florence Nightingale 1820-1910,
Begründerin der modernen westlichen Krankenpflege*



RHOMBO-MEDICAL® unterstützt professionell Pflegende

Die Anforderungen des Pflegealltags wachsen stetig. Das vielfältige Aufgabenspektrum der Pflege ist heute sehr anspruchsvoll und herausfordernd. Der Pflegeberuf ist viel mehr als ein Beruf, er bedeutet Hingabe und Berufung in der Pflegearbeit zu spüren.

RHOMBO-MEDICAL® unterstützt seit Jahrzehnten professionell Pflegende in ihrer hingebungsvollen Arbeit und ermöglicht damit individualisierte Begleitung und Pflege von erkrankten und/oder pflegebedürftigen Menschen.



Lück GmbH & Co.KG · 46395 Bocholt
Tel. +49 (0)2871 / 99 79-0 · Fax +49 (0)2871 / 99 79-10
www.rhomb-medical.de · info@rhomb-medical.de

Stand: 05.2025

Nachdruck, Vervielfältigung sowie Veröffentlichung im Internet o.ä. Medien –
auch auszugsweise – nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Herausgebers.

W0090-3